

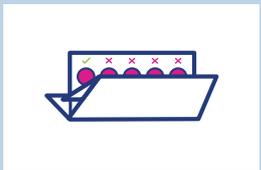
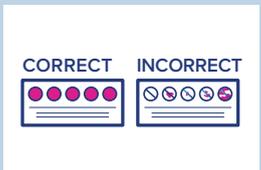


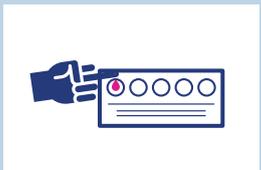

INSTRUCCIONES PARA RECOGER MUESTRAS

SANGRE

Por favor lea todas las instrucciones antes de comenzar. Busque dentro de este kit el kit de sangre para obtener mas información.




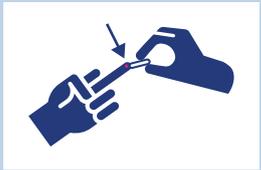


1. Escriba su nombre, fecha de nacimiento y fecha de recolección en los campos designados. Utilice el formato MM/DD/AAAA*
2. Abra la solapa de la tarjeta de sangre para exponer los círculos en el papel de extracción de sangre. No toque el papel de recogida de sangre.
3. Lávese las manos con agua tibia durante al menos 30 segundos. Luego agite la mano vigorosamente durante 15 segundos para estimular el flujo de sangre a sus dedos.
4. Limpie la yema del dedo con una gasa con alcohol. Es mejor usar el dedo medio o anular de su mano no dominante.
5. Tome la lanceta y retire la tapa. Presione la punta pequeña firmemente en el costado de su dedo, cerca de la punta, hasta que la aguja salga con un clic. Lancet es de un solo uso.
6. Manteniendo la mano al nivel de la cintura, masajee el dedo desde la base hasta la punta para estimular el flujo sanguíneo. A medida que se forma la gota de sangre, toque la gota en el centro del círculo. No toque el papel de extracción de sangre con el dedo, ya que esto restringirá el flujo sanguíneo, reducirá la saturación y puede provocar el rechazo de la muestra.
7. Llene completamente cada círculo en el papel de recolección de sangre. Está bien que la sangre se extienda más allá de las líneas.
8. Permita que el papel de recolección de sangre se seque al aire sobre una superficie plana durante al menos 30 minutos. No caliente ni seque el papel de recolección de sangre con secador. El calor dañará la muestra.
9. Cuando el papel de extracción de sangre esté seco, cierre la tarjeta de sangre metiendo la solapa. Coloque la tarjeta de sangre en la bolsa de riesgo biológico con el paquete desecante. Asegúrese de que la bolsa esté sellada correctamente.

* Asegúrese de utilizar ceros a la izquierda en las fechas para que el laboratorio acepte su kit de prueba. Por ejemplo, si la fecha es febrero 5 del 2024, debe escribir 02/05/2024.

ORINA

Por favor lea todas las instrucciones antes de empezar.

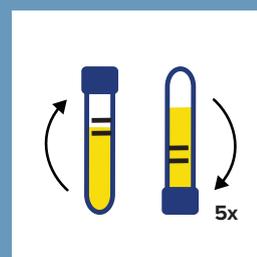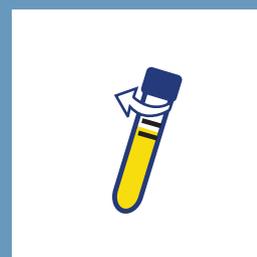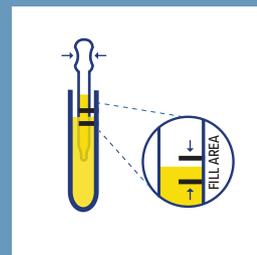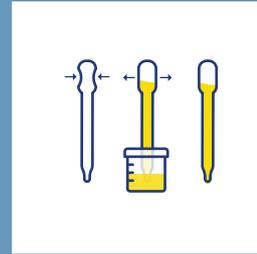


1. No orine durante al menos 1 hora antes de la recolección. **Lo mejor es usar la primera orina de la mañana.**
2. Orine directamente en el recipiente colector con la **primera parte del chorro** y recoja de 30 ml a 50 ml de orina.
3. Utilice la pipeta para transferir la orina de la taza de recolección a los tubos de recolección marcados como "Urine".
4. Llene el tubo de recolección hasta que la combinación de líquidos esté entre las líneas de llenado designadas. **No llene el tubo más allá de la línea de llenado máximo o la muestra será rechazada.**
5. Coloque la tapa sobre la tapa de recolección y asegúrese de que esté cerrado de manera uniforme y firme.
6. Escriba su fecha de nacimiento en formato MM/DD/AAAA* en el tubo en el área designada (DOB).
7. Escriba la fecha de recolección de la muestra (fecha de hoy) en formato MM/DD/AAAA* en el tubo en el área designada (Coll. DT).
8. Coloque la muestra en la bolsa de riesgo biológico y asegúrese de que el sello esté completamente cerrado.



* Asegúrese de utilizar ceros a la izquierda en las fechas para que el laboratorio acepte su kit de prueba. Por ejemplo, si la fecha es febrero 5 del 2024, debe escribir 02/05/2024.

HISOPO DE GARGANTA

Por favor lea todas las instrucciones antes de empezar.

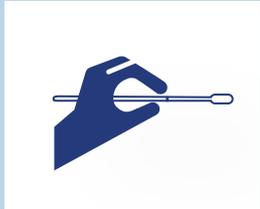


1. Sostenga el hisopo con la línea marcada sobre su mano.
2. Inserte el hisopo en la boca y frote la punta del hisopo contra la parte posterior de la garganta durante 10-20 segundos.
3. Retire con cuidado el hisopo y colóquelo en el tubo de recolección marcado como "Oral". Rompa el hisopo por la línea marcada doblándolo contra el tubo de recolección.
4. Coloque la tapa sobre el tubo de recolección y asegúrese de que esté bien cerrado. **No vacíe el conservante líquido del tubo de recolección si lo hubiera.**
5. Escriba su fecha de nacimiento en formato MM/DD/AAAA* en el tubo en el área designada (DOB).
6. Escriba la fecha de recolección de la muestra (fecha de hoy) en formato MM/DD/AAAA* en el tubo en el área designada (Coll. DT).
7. Coloque la muestra en la bolsa de riesgo biológico y asegúrese de que el sello esté completamente cerrado.

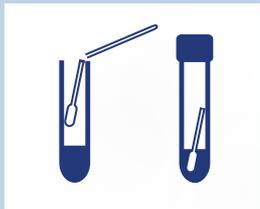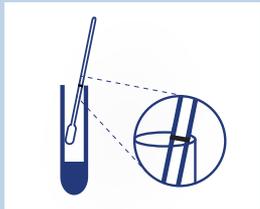



* Asegúrese de utilizar ceros a la izquierda en las fechas para que el laboratorio acepte su kit de prueba. Por ejemplo, si la fecha es febrero 5 del 2024, debe escribir 02/05/2024.

HISOPO RECTAL

Por favor lea todas las instrucciones antes de empezar.

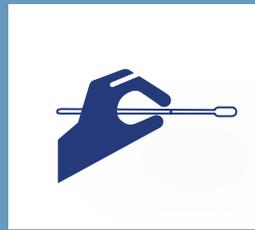

1. Sostenga el hisopo con la línea marcada sobre su mano.
2. Inserte el hisopo de 3 a 5 cm (1 a 2 pulgadas) en el canal anal.
3. Gire suavemente el hisopo durante 10-20 segundos mientras frota el hisopo contra las paredes del recto.
4. Retire con cuidado el hisopo y colóquelo en el tubo de recolección marcado como "Anal". Rompa el hisopo por la línea marcada doblándolo contra el tubo de recolección. **No vacíe el conservante líquido del tubo de recolección si lo hubiera.**
5. Coloque la tapa sobre el tubo de recolección y asegúrese de que esté bien cerrado.
6. Escriba su fecha de nacimiento en formato MM/DD/AAAA* en el tubo en el área designada (DOB).
7. Escriba la fecha de recolección de la muestra (fecha de hoy) en formato MM/DD/AAAA* en el tubo en el área designada (Coll. DT).
8. Coloque la muestra en la bolsa de riesgo biológico y asegúrese de que el sello esté completamente cerrado.

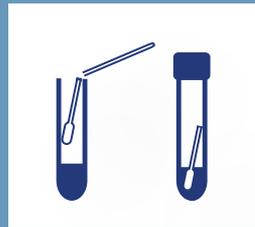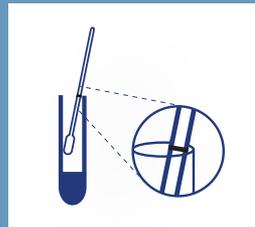

* Asegúrese de utilizar ceros a la izquierda en las fechas para que el laboratorio acepte su kit de prueba. Por ejemplo, si la fecha es febrero 5 del 2024, debe escribir 02/05/2024.

LISTA DE VERIFICACIÓN E INSTRUCCIONES DE ENVÍO

- ¿Ha utilizado todos los dispositivos de recolección incluidos en el kit para recolectar las muestras requeridas?
- ¿Su fecha de nacimiento está en todos los tubos de recolección de muestras y en la tarjeta de sangre en formato MM / DD / AAAA?
- ¿La fecha de recolección está escrita en todos los tubos de recolección de muestras y en la tarjeta de sangre usando el formato MM / DD / AAAA?
- ¿Los círculos de las tarjetas de sangre están completamente llenos de sangre y empapados a través de la tarjeta de recolección?
- ¿Cada tubo de recolección de muestras y la tarjeta de sangre están sellados en su propia bolsa de riesgo biológico? (SOLO una muestra por bolsa)
- ¿Se colocaron todas las muestras en la caja?
- ¿Se ha colocado la caja en la bolsa de envío de devolución prepagada?
- ¿La bolsa de reenvío está completamente sellada?

Deje su kit completo en cualquier ubicación del servicio postal de EE. UU. Recibirá una notificación por correo electrónico cuando su kit sea recibido en el laboratorio y cuando sus resultados de laboratorio estén listos.